

”

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі

Фармация комитеті
Төрағасының

2006 жылғы "07" _____

№ 184 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН



Медициналық мақсаттағы бұйымдарды қолдану жөніндегі
тутынушыларға арналған нұсқаулық
(аннотация – қосымша бет)

Медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауы

Протездердің базисін дайындауға арналған "Villacryl H Plus"

стоматологіялық пласмасса

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы:

Құрамына қызыл маржан қосылған қызғылт жолағы бар бөтен заттармен
ластанбаған қызғылт ұнтақ.

Сұйықтық: метил метакрилаты, 1,2 диметокрилатэтандиола, PN EN ISO
1567:2002 нормасының талаптарына сай, тұнба немесе лайлануы жоқ, түссіз
сұйықтық.

Жиналуы: 750 гр ұнтақ салынған қақпағында кепілдік пломбасы бар
полиэтиленнен жасалған пласстмассалық контейнер. 400 мл сұйықтық құйылған
кепілдік сақинасы және тығыны бар, қоңыр органикалық шыныдан жасалған
бөтелке.

Қолдану аймағы

Тіс протезінің базисін дайындау үшін ысытылып барып қатыру арқылы
тістехникасының зертханасында қолданылады

Қолдану әдісі:

Балауыз протезді гипске батырыңыз. Барлық балауызды абайлап алып тастаңыз
да, оны бөлгіш лакпен өңдеңіз. Араластырудың арақатысы: 10г ұнтақ/ 4,2мл
сұйықтықтық Әуелі ыдысқа сұйықтықты құйып, содан кейін ұнтақты қосу керек.
30 секөнт бойы мұқият арластырыңыз. Одан кейін массаның ісінуі үшін 10
минөтке қалдырыңыз. Массаны жинауды массаның ыдыс қабырғасына
жабысуын тоқтатқан кезде бастау керек. Бөлме температурасында пластмассаны
модельдеуді 20 минөт бойы жүргізуге болады. Жинауды бастар алдында массаны

аздап артық мөлшерде алып, арасында аздаған үзіліс жасап, оны жайлап қысыңыз. Полимеризацияны бастағанда кюветаны қайнап тұрған ыстық суға салып 20 минут бойы пісіріңіз. Пісіру барысында, әсіресе жуан потездерді қайнап тұрған суға салғаннан кейін, отты өшіріп, 15 минутке қалдырыңыз. Кюветаны судан шығарып, бөлме температурасына дейін салқындатыңыз.

Сақтау шарттары:

Жақсы желденетін үй-жайларда, жылу көздерінен, ашық оттан алыс жерде сақтау керек.

Сұйық құйылған бөтелкелерді тікелей күн көзіне қоюға болмайды.

Жарамдылық мерзімін көсеткенде «Жарамдылық мерзімі біткеннен кейін қолдануға болмайды» деген белгі болуы керек.

Жарамдылық мерзімі біткеннен кейін қолдануға болмайды. Сақтау мерзімі 3 жыл.

Медициналық бұйымды өндіруші ұйымның атауы, заңды мекен-жайы, өндіріс орнының мекен-жайы - «Zhermapol Sp.z.o.o.»

Заңды мекен-жайы : ul.Augustovka14, 02-981 Warszawa, Poland. Өндіруші

зауыттың мекен-жайы : ul.Avgustovka14, 02-981 Warszawa, Poland.