

Инструкция **по медицинскому применению медицинского изделия**

Наименование медицинского изделия:

Масса оттискная альгинатная Уреен.

Состав и описание:

Масса оттискная альгинатная Уреен представляет собой слегка ароматизированный порошок зеленого цвета, не содержащий механических примесей.

Время затвердевания при температуре +23°C: 2-3 мин. Остаточная деформация: макс. 3%. Временная деформация: 10-20%. Прочность на сжатие: мин. 0,7 мПа.

Область применения:

Зуботехническая лаборатория.

Назначение:

Предназначен для получения оттисков при изготовлении частичных съемных протезов, предварительных оттисков при изготовлении полных съемных протезов (для изготовления индивидуальных оттискных ложек), для получения оттисков в ортодонтической практике, оттисков для изготовления рабочих моделей, временных коронок и мостовидных протезов.

Способ применения:

Массовое соотношение воды и порошка альгинатной оттискной массы при замешивании составляет 20 мл к 10г. Порошок перед использованием тщательно встряхивают. В чашку для замешивания наливают воду, затем приложенной мерной ложкой набирают порошок из пластмассовой банки или пакетика и выкладывают в чашку, тщательно перемешивают пластмассовым шпателем путем растирания вдоль стен чашки. Время замешивания составляет 30 секунд. Время обработки – 2 мин. при температуре +23°C (включая время замешивания). Время затвердевания – 2 мин. 30 сек. при температуре +23°C (включая время замешивания). Затем оттиск промывают в проточной воде и дезинфицируют, например, в дезинфицирующем растворе Йодизол, разбавленном в соотношении 1:10 (в течение 30 секунд).

Оттиск рекомендуется заливать гипсом непосредственно после изготовления, допускается хранение в течение 4 часов при 100% влажности.

Примечание: Для работы с альгинатной оттискной массой рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду при температуре +23°C. В случае повышения температуры или жесткости воды время обработки и затвердевания сокращается.

Модификации:

1. Порошок Уреен 7×450 г. в пакетах,
2. Порошок Уреен 1×450 г. в пакетах,
3. Порошок Уреен 1×800 г. в банке,
4. Мерные ложки.

Срок годности: 2 года.

Не применять после истечения срока годности!

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении при температуре от +5°C до +25°C.

Организация-производитель:

SpofaDental a.s.

Юридический адрес: Markova 238, 506 01 Jicin, Czech Republic.

Телефон: +420 493 583 111

Уполномоченный представитель производителя на территории Республики Казахстан:

ТОО «Луч»






Юридический адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, 50






Телефон/факс: +7 (727) 274-01-57, +7 (727) 279-69-63

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие:

ISO 21563:2013 «Стоматология. Гидроколлоидные материалы для оттисков».

Символы и обозначения маркировки:

| | |
|---|---|
|  | Соответствие европейским стандартам |
|  | Знак соответствия Российским стандартам |
|  | Обратитесь к инструкции по применению |
|  | Температурный диапазон хранения |
|  | Код партии |

| | |
|---|---|
|  | <p>Производитель</p> |
|  | <p>Срок годности</p> |
| <p>REF</p> | <p>Номер по каталогу</p> |
|  | <p>Продукт является медицинским изделием</p> |
|  | <p>Украинский знак стандартизации («трилистник»)</p> |
|  | <p>Знак для вторичной переработки «Смесь полиэтиленфталат/полиэтилен»</p> |