

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «___» _____ 2017г.
№ ___ -

Инструкция по медицинскому применению
изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения

Материал стоматологический для наружного применения «Лидоксор гель»

Состав и описание изделия

Материал «Лидоксор гель» должен представлять собой гелеобразный, прозрачный продукт желтого, красного, зеленого цвета - в зависимости от ароматизатора. Материал должен быть однородным, без посторонних твердых включений, допускается наличие пузырьков воздуха.

Состав:

Натрий карбоксиметилцеллюлоза, тимол, ментол, лидокаин, экстракт ромашки, экстракт тысячелистника, глицерин, ароматизатор, вода дистиллированная, поли(1-винил-2-пирролидон), натрия бензоат, сорбитол ксилитол.

Наименование и (или) товарный знак организации-производителя
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ», Россия

Область применения

Стоматология. Припасовка коронок и мостовидных протезов; устранение рвотного рефлекса при снятии слепков; обработка слизистой оболочки при удалении зубного камня; обработка слизистой оболочки перед вскрытием пародантальных абсцессов; обработка слизистой оболочки при удалении молочных подвижных зубов; дезинфекция слизистой оболочки перед инъекцией.

Способ применения

Предварительно подсушить обрабатываемую поверхность слизистой оболочки полости рта. Выдавить из тюбика необходимое количество геля и смазать препаратом нужное место на слизистой оболочке. Для достижения более глубокой анестезии следует нанести гель на ватный тампон, а затем этим тампоном обработать подготовленную поверхность. При необходимости тампон можно приложить к обрабатываемому месту и оставить на некоторое время (1-2 мин.) до получения желаемого эффекта.

Противопоказания

Возможна аллергическая реакция на лидокаин.

Аллергия на лидокаин может проявляться практически безобидно в виде обычной крапивницы или дерматита. Но в тяжелой форме ситуация становится гораздо сложнее, потому что может возникнуть ряд сложных аллергических реакций, таких как отек, бронхиальная астма и ринит, анафилактический шок, аллергический васкулит, отек Квинке.

У детей возможны различные реакции на препарат, поэтому в детской практике крайне важно делать аллергическую пробу непосредственно перед процедурой с применением лидокаина.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Комплектность

1. Туба с гелем - 45г. (зеленое яблоко / цитрус / лесная ягода);
2. Инструкция.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадания прямых солнечных лучей. После вскрытия целесообразно употребить гель в течение 1 года.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

Наименование, страна, юридический адрес организации-производителя:

ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ», Россия,

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212

Тел.: +7 (800) 500-51-92. Тел./факс: +7 (495) 679-80-53

E-mail: info@omegadent.ru

www.omegadent.ru

Наименование и адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии (предложения) от потребителей:

ТОО «Стомед», 110007, Казахстан, г. Костанай, ул. Уральская, 14

Телефон/Факс: +7 (714-2) 28-01-75;

reg@medsales.kz