

Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия:

Гипс стоматологический BMS тип III (жесткий) и IV(супер жесткий) в упаковке 5 кг или 25 кг.

Состав и описание медицинского изделия:

Изделие представлено в виде однородного порошка без комочков, состоящего из полугидрата сульфата кальция, модификаторов и красителей. Гипс BMS тип III доступен в трёх цветовых решениях: желтый, голубой и розовый. Гипс BMS тип IV: золотисто-коричневый, зеленый и розовый. Материал имеет следующие технические характеристики: соотношение для смешивания: 24-26 мл воды для гипса типа III и 20-22 мл (тип IV) на 100г порошка; рабочее время от 4 до 5 минут; начальный набор 5 минут; завершающий набор 8-10 минут; расширение 0.16%; сила сжатия 510-950 кг/см²Dry. Гипс имеет высокое абразивное сопротивление. Изделие относится ко 2а классу безопасности.

Комплектность к медицинскому изделию:

1. Гипс стоматологический BMS тип III (жесткий) в упаковке 5 кг;
2. Гипс стоматологический BMS тип III (жесткий) в упаковке 25 кг;
3. Гипс стоматологический BMS тип IV(супер жесткий) в упаковке 5 кг;
4. Гипс стоматологический BMS тип IV(супер жесткий) в упаковке 25 кг.

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие:

ISO 6873 (ГОСТ 31568-2012).

Область применения и назначение медицинского изделия:

Стоматология. Моделирующий гипс общего назначения для использования в работе с коронками и мостами.

Способ применения:

Взвесьте 200 г гипса и соответствующее количество воды, указанное в спецификации (см. ниже). Добавьте порошок в воду и перемешивайте в течение 60 секунд. По окончании перемешивания введите необходимое количество гипса для заполнения формы и его выравнивания.

Технические данные	
Соотношение вода/порошок	24-26 мл/100 г
Время смешивания (вручную)	60 секунд

Время смешивания (в вакууме)	30 секунд
Время обработки	5 минут
Время схватывания	120 минут
Расширение через 2 часа	0,16%
Сопротивление сжатию (1ч)	510-950 кг/см ² Dry

Меры предосторожности: Закрывать сразу же после использования!

Условия хранения медицинского изделия:

Хранить при температуре не выше 25°C, в сухом, защищённом от прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.

Не использовать после истечения срока годности!

Для использования только в стоматологии!

Срок хранения: 5 лет.

Наименование, адрес (юридический) и контактные данные организации-производителя:

BMS DENTAL S.r.l.,

ул. М.Буонарроти, 21\23\25-56033, Капанноли (Пиза), Италия.

Телефон: +0039-0587-606089, факс: +0039-0587-606875.

E-mail: info@bmsdental.it

Наименование, юридический адрес и контактные данные уполномоченного представителя производителя на территории Республики Казахстан: организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия:

ТОО Stomat.Co.

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская обл., город Актау, 8 мкр-он дом 22 кв.77.



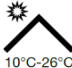

Телефон /Факс: 8 (7292) 603431

E-mail: stomat.co@yandex.kz

Последний пересмотр инструкции по медицинскому применению:

XX.XX.XXXX г.

Расшифровка символов и обозначений, указанных на маркировке:

	Изготовитель
	Артикул (каталожный номер)
	Хранить при температуре не выше 25°C
	Беречь от влаги